

A. Seitensicherungen

Um die Seitensicherungen hochzustellen, drücken Sie den Knopf am unteren Ende des jeweiligen Elements der Seitensicherung (1) und ziehen Sie die Seitensicherung nach oben (2). Beginnen Sie mit dem kopfseitigen Teil der Seitensicherung.



Um die Seitensicherungen herabzulassen, drücken Sie den Knopf am unteren Ende des jeweiligen Elements der Seitensicherung und bewegen die Seitensicherung nach unten. Beginnen Sie mit dem fußseitigen Teil der Seitensicherung.

B. Patientenhandschalter

<p>1. Liegefläche Anheben des Rückenteils</p> <p>2. Liegefläche Anheben des Oberschenkelteils</p> <p>3. Comfort-Taste (optional) (Anti-Trendelenburglage) neigt die gesamte Liegefläche fußseitig ab</p> <p>4. Höhenverstellung auf Hebt die gesamte Liegefläche des Bettes in die gewünschte Position</p>	<p>5. Liegefläche Absenken des Rückenteils</p> <p>6. Liegefläche Absenken des Oberschenkelteils</p> <p>7. Höhenverstellung ab Senkt die gesamte Liegefläche des Bettes in die gewünschte Position ab</p> <p>8. Rollenfreischaltung Gleichzeitiges Drücken der Tasten 7 und 8 versetzt das Bett in die niedrigste Position und sorgt dafür das die Laufrollen ausgefahren werden.</p>
--	--

C. Steuerboxfunktionen

1. Höhenverstellung: Hub „AUF/AB“ :

„Doppelclick“ **aufwärts/abwärts** bewirkt Anfahren der höchsten bzw. niedrigsten Position. Diese Bewegung kann durch Drücken jeder beliebigen Taste gestoppt werden.

2. Sperrschalter


Sperrt sämtliche Handschalterfunktionen sowie die Hub- und Liegeflächenfunktionen auf dem Schwesternschalter. Trendelenburgpositionen bleiben bedienbar.

3. Trendelenburg-Position

Stufenloses Anfahren der Kopf-Tieflage bis hin zur korrekten Trendelenburg-Position.

4. Anti-Trendelenburg-Position

Stufenloses Anfahren der Fuß-Tieflage bis hin zur korrekten Anti-Trendelenburg-Position.
 → Durch Höhenverstellung in die jeweils höchste oder niedrigste Position bzw. die jeweils entgegengesetzte Tieflagenfunktion werden die Trendelenburg-Positionen aufgehoben.

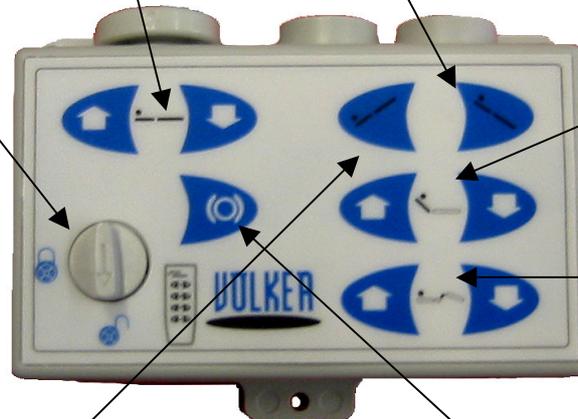

5. Liegefläche

Anheben/Senken Rückenteil

6. Liegefläche

Anheben/Senken Oberschenkelteil

9. Rollentaste

Gleichzeitiges betätigen der Rollentaste und der „Hub Ab“-Taste macht das Bett fahrbereit.

D. Erweiterte Fußteilverstellung

Betätigen der Taste  fährt das Bett in die „Knieknick“-Stellung.



Durch manuelles justieren des Rastomaten kann das Bett in die „Fußhochlage“ gebracht werden.



Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Bedienungsanleitung