

# Kurzgebrauchsanweisung für Klinikbett Modell S 860-2 (Steuerbox mit Komplettspernung)

Das Völker Klinikbett S 860-2 ist bis auf die durchgehenden Seitengitter baugleich mit dem Modell S 960-2. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Bedienung der Seitengitter und beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Klinikbettes Modell S 960-2.

## A. Seitengitter

### Um die Seitengitter hochzustellen,

- greifen Sie einfach den oberen Seitengitterholm und heben Sie diesen zuerst kopfseitig und dann fußseitig bis zum hörbaren Anschlag an.



### Um die Seitengitter herabzulassen,

- greifen Sie den oberen Seitengitterholm und heben Sie diesen leicht an,
- ziehen Sie an dem seitlich angebrachten Sicherungsknopf (s. Bild 1) in Pfeilrichtung und führen Sie schließlich die Seitengitter mit der Hand nach unten.
- Lassen Sie dabei zuerst die fußseitigen und dann die kopfseitigen Seitengitter ab.



- Beim Ablassen der Seitengitter bzw. bei nichtsachgemäßen eingerasteten Seitengittern besteht Einklemmgefahr! Um diese Gefahr zu verhindern, dürfen die Seitengitter nur durch geschultes Pflegepersonal bedient werden!
- Aus Sicherheitsgründen sind die Seitengitter bei einer von oben wirkenden Belastung nicht auslösbar.

## B. Patientenhandschalter

Rückenteil auf Rückenteil ab

Oberschenkelteil auf Oberschenkelteil ab

Höhenverstellung auf Höhenverstellung ab

Komfort-Taste  
(Anti-Trendelenburglage)  
Aktivierung/Deaktivierung


**C. Personaltastatur**

**Höhenverstellung**

Hebt/Senkt die gesamte Liegefläche des Bettes in die gewünschte Position auf und ab.

**Rückenteil**

Anheben und Absenken des Rückenteils

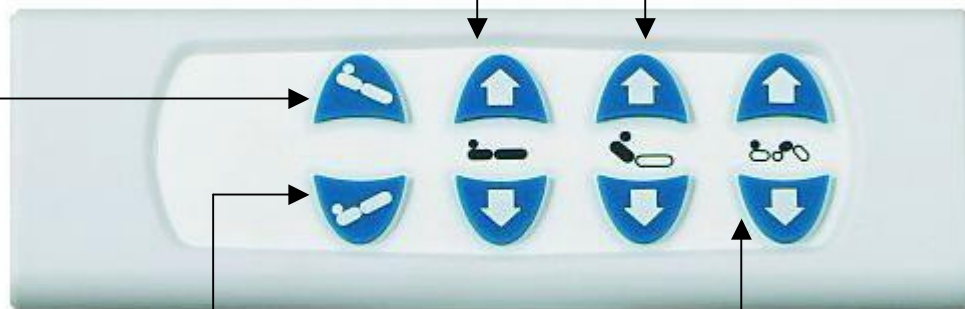

**Anti Trendelenburg**

Hebt die gesamte Liegefläche kopfseitig hoch

**Trendelenburg**

Hebt die gesamte Liegefläche fußseitig hoch

**Beinteil**

Anheben und Absenken des Beinteils

**D. Funktionen sperren**

Durch die Aktivierung der Sperre am Patientenhandschalter werden alle Funktionen des Handschalters gesperrt. Die Personaltastatur bleibt funktionsfähig.

Durch die Aktivierung der Sperre an der Personaltastatur werden alle Funktionen des Bettes gesperrt.



**Aktivierung der Sperre**



**Deaktivierung der Sperre**



**Wenn Sie eine der Funktionen des Bettes nicht nutzen können sollten, überprüfen Sie bitte die Sperre am Handschalter oder der Personaltastatur.**



**Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanweisung**