

Kurzgebrauchsanleitung S 960-2W

mit Supervisor-Steuerbox integriert in die Bettzeugablage



A. Seitensicherung S 960-2 W :


Um ein Seitensicherungsteil aufzustellen,

ziehen Sie das Teil seitlich horizontal bis zum Anschlag heraus und klappen Sie es hoch.

Um die Höhe der Seitensicherung einzustellen, ziehen Sie den teleskopierbaren Teil bis zum Anschlag nach oben.


Zum Herunterklappen des Seitensicherungsteils

1. die beiden Knöpfe auf der Außenseite des Rahmens drücken um den höhenverstellbaren Teil des Sicherungsteils in die niedrigste Position zu bringen.

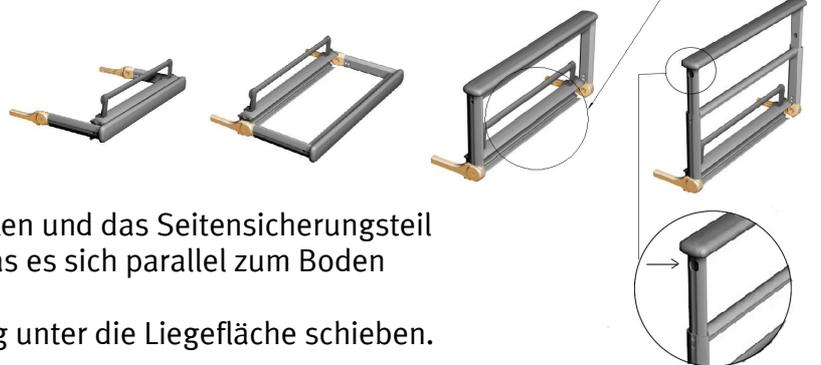

2. Den Auslöser nach unten drücken und das Seitensicherungsteil in die Horizontale kippen, so das es sich parallel zum Boden befindet.
3. Die Seitensicherung vollständig unter die Liegefläche schieben.

B. Patientenhandschalter

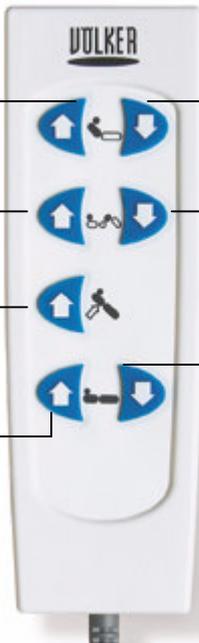- 
1. **Liegefläche**
Anheben des Rückenteils
 2. **Liegefläche**
Anheben des Beinteils
 3. **Komfort-Taste**
(Anti-Trendelenburglage)
neigt die gesamte Liegefläche ab
 4. **Höhenverstellung auf**
Hebt die gesamte Liegefläche des Bettes in die gewünschte Position
 5. **Liegefläche**
Absenken des Rückenteils
 6. **Liegefläche**
Absenken des Beinteils
 7. **Höhenverstellung ab**
Senkt die gesamte Liegefläche des Bettes in die gewünschte Position ab

C. Supervisor-Steuerbox integriert in die Bettzeugablage :

Völker AG • Wullener Feld 79 • 58454 Witten
Telefon (02302) 960 960 • Telefax (02302) 960 96 16 • www.voelker.de
service@voelker.de • kostenloses Service-Telefon : 0800-VOELKER

Kurzgebrauchsanleitung S 960-2W

mit Supervisor-Steuerbox integriert in die Bettzeugablage



- 1. Rückenteil sperren**
Deaktiviert die Rückenteil-funktionen am Handschalter.
- 2. Beinteil sperren**
Deaktiviert die Oberschenkelteil funktionen am Handschalter
- 3. Trendelenburg sperren**
Deaktiviert die Trendelenburg-funktionen am Handschalter
- 4. Deaktivierung des Handschalters**
- 5. Rückenteil auf/ab**
- 6. Beinteil auf/ab**
- 7. Liegefläche gesamt auf/ab**
- 8. Trendelenburg (Kopftiefposition)**
- 9. Antitrendelenburg (Fußtieftposition)**
- 10. Grundstellung**
Alle Referenzpunkte des Bettes werden angefahren
- 11. Trendelenburg (mit Liegefläche)**



Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Bedienungsanleitung