

Völker - Auffangmatten

ZP-2057/1 (für Modell 3010)




1. Drücken Sie die flexiblen Enden des Hakens zusammen.
2. Führen Sie die zusammengedrückten Enden des Hakens in die dafür vorgesehene Öffnung auf der Unterseite der Seitenwange ein und schieben Sie den Haken an die gewünschte Position.
3. Um die äußeren Haken anzubringen müssen Sie Kopf- & Fußteil abschrauben!
4. Hängen Sie die Auffangmatte in die Haken ein.

ZP-2057/2 (für Betten mit Holzwange, bis Juni 1996)




1. Hängen Sie den Haken in die Seitenwange ein.
2. Hängen Sie die Auffangmatte in die Haken ein.

ZP – 2057/3 (für Betten mit Aluwange und Dekorstreifen, ab Juni 1996)

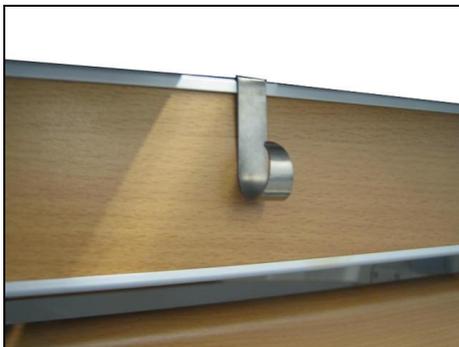

1. Hängen Sie den Haken in die Seitenwange ein.
2. Hängen Sie die Auffangmatte in die Haken ein.

ZP – 2057/4 (für Betten ab Mai 2004)

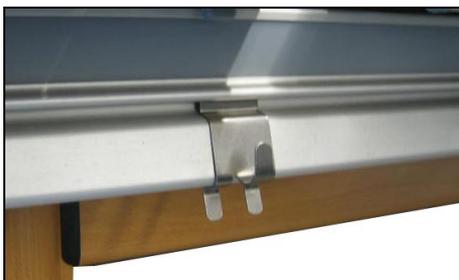

1. Hängen Sie den Haken in die Seitenwange ein.
2. Hängen Sie die Auffangmatte in die Haken ein.