

# Gebrauchsanweisung

## Bedienung | Seitengitter bei S 862-2, S 862-2W, S 860-2, S 861-2W, S 861-1

**VÖLKER**

### Seitengitter hochstellen

Um die Seitengitter hochzustellen, ziehen Sie das oberste Seitengitterelement zuerst kopf- und dann fußseitig bis zum hörbaren Einrasten an.



### Seitengitter herablassen

Um die Seitengitter herabzulassen, heben Sie das oberste Seitengitterelement an einer Seite leicht an.

Ziehen Sie dann den seitlich angebrachten Zugschnapper mit der anderen Hand nach außen und lassen das Seitengitter langsam mit der Hand nach unten ab (Abb. 3).



Führen Sie diesen Vorgang zuerst fußseitig und danach kopfseitig durch.

Aus Sicherheitsgründen sind die Seitengitter bei einer von oben wirkenden Belastung nicht auslösbar.



### WARNUNG „Klemmgefahr“

Die Seitengitter müssen entweder vollständig angehoben und sicher eingerastet sein oder sich in der vollständig heruntergelassenen Position befinden.

Es sind zwei Aufstellkonfigurationen möglich:

#### Alle Seitengitter unten (Abb. 1):

Das Bett ist von beiden Seiten uneingeschränkt zugänglich.

#### Alle Seitengitter oben (Abb. 2):

Der Bewohner genießt den maximalen Schutz gegen Herausrollen aus dem Bett.

# Gebrauchsanweisung

## Bedienung | Seitengitter | Allgemeine Sicherheitshinweise

VÖLKER



**WARNUNG** Alle Personen, in deren Aufgabengebiet die Handhabung der Seitengittern fällt, müssen die folgenden Informationen gelesen haben und befolgen:

- Bei Betätigung von Rücken-, Oberschenkel- oder Unterschenkelteilverstellung bzw. des Hubes oder der Seitengitter ist unbedingt darauf zu achten, dass der Patient weder Kontakt mit den Seitengittern hat, noch irgendein Körperteil durch die Seitengitter ragt.
- Werden die Seitengitter bei einer Person, deren psychischer Zustand den Gebrauch notwendig erscheinen lässt, verwendet, so ist darauf zu achten, dass der Handschalter außerhalb deren Reichweite aufbewahrt wird bzw. dessen Funktionen komplett gesperrt werden. Es ist in jedem Fall dafür Sorge zu tragen, dass keine Gefahren entstehen können.
- Für die Seitengitter sind als Zubehör Schutzbezüge erhältlich, die einen zusätzlichen Schutz bezüglich Verletzungen durch Kontakt mit den Seitengittern bieten. Der Gebrauch dieser Schutzbezüge wird bei allen Personen empfohlen, bei denen das Verletzungsrisiko durch unvermeidbare Kontakte mit den Seitengittern sehr hoch ist. Der Gebrauch befreit den Pflegenden oder Patienten aber nicht von der gebotenen Sorgfalt bei der Bedienung des Bettes.
- Wenn die Seitensicherungen benutzt werden, müssen sie immer entweder vollständig angehoben und sicher eingearastet sein, oder vollständig bis zum Anschlag heruntergelassen sein. Wegen der Gefahr des Einklemmens dürfen sie **niemals** in einer nicht eingearasteten Position verbleiben.
- Bei beschädigten Seitengittern besteht die Gefahr des Herausfallens.