


Kurzgebrauchsanweisung für Einsteckscheiben

ZK-969/3, ZP-3067/2, ZK-969/2, ZP-3067, ZK-969, ZP-1069 für Betten ab Baujahr Mitte 2003

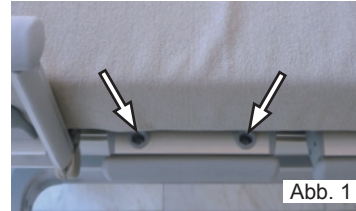


Die Einsteckscheiben schließen die Mittellücke zwischen den Seitengittern an Völker Betten, um eine durchgehende Seitengitterlösung zu ermöglichen.

Seitengitter aufstellen

1. Stellen Sie zunächst die Seitengitter am Bett auf. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Gebrauchs- oder Kurzgebrauchsanweisung.

Einsteckscheibe anbringen

1. Führen Sie die Stifte der Einsteckscheibe in die Einsteckhülsen mittig am Bettrahmen ein (Abb. 1). Achten Sie darauf, dass die Einsteckscheibe die Seitengitter an der Außenseite überdeckt (Abb. 2).
2. Überprüfen Sie, ob die Pendelverriegelung komplett eingerastet ist, indem Sie versuchen die Einsteckscheibe nach oben herauszuziehen. Sollte dies gelingen, drücken Sie die Einsteckscheibe wieder vollständig herunter und justieren Sie das Pendel, bis sich die Einsteckscheibe nicht mehr herausziehen lässt (Abb. 3).

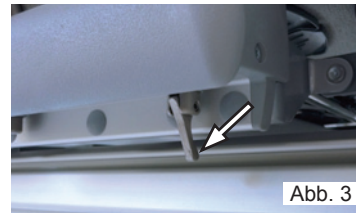

Einsteckscheibe entnehmen

1. Um die Einsteckscheibe wieder aus der Halterung zu entnehmen, bringen Sie das Pendel in eine senkrechte Position und ziehen Sie gleichzeitig die Einsteckscheibe nach oben heraus (Abb. 3).



WARNUNG Vergewissern Sie sich, dass die Seitengitter - oder Teile davon - vollständig aufgestellt und eingerastet sind. Bei Betätigung der elektrischen Liegeflächenverstellung oder der Seitengitter ist darauf zu achten, dass der Patient/Bewohner weder Kontakt mit den Seitengittern hat, noch irgendein Körperteil durch die Seitengitter ragt. Es wird ausdrücklich empfohlen die Funktionen des Handschalters zu sperren.

HINWEIS Bitte beachten Sie die Hinweise in der ausführlichen Gebrauchsanweisung des Bettes!